

Estetic Pen - mezoterapia mikro i nanoigłowa

Instrukcja obsługi

1. Ładowanie
W celu naładowania urządzenia należy umieścić kabel zasilający w gnieździe DC, a następnie należy umieścić zasilacz w gniazdku sieciowym. Zielona lampka symbolizuje całkowite naładowanie. Lamka czerwona sygnalizuje ładowanie.
2. Przygotowanie urządzenia do zabiegu
Kartridż należy wyjąć z opakowania i umieścić w urządzeniu poziomo i wepchnąć do końca. Aby zablokować kartridż należy przekręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Długość igieł jest regulowana po włączeniu urządzenia. Aby usunąć kartridż należy obrócić go w prawo i wyjąć.
3. Regulacja prędkości
Aby uruchomić urządzenie należy dłużej przytrzymać przycisk (ok 3 sekundy). Kolejne krótkie naciśnięcia przycisku startowego będą zwiększały szybkość urządzenia od 1-6. Aby wyłączyć urządzenie należy dłużej przytrzymać włącznik(ok 3 sekundy)
4. Regulacja długości igieł
Długość igieł ustalamy obracając pierścieniem ze skalą długości.

Protokół zabiegu

1. Dokładnie oczyszczamy skórę
2. Peeling enzymatyczny lub ziarnisty w celu usunięcia martwego naskórka
3. Aplikacja kremu znieczulającego w przypadku intensywnej kuracji. Ok 15-30 minut
4. Zmycie kremu znieczulającego
5. Dezynfekujemy skórę przy pomocy Inno-Derma Degreasing Solution
6. Aplikujemy odpowiednio dobrany koktajl
7. Dobieramy długość igieł oraz szybkość pracy urządzenia. Pracując na długościach do 0,5 mm nie odrywamy kartridża od skóry, natomiast od długości 0,75 mm pracujemy stemplowo. Tabela doboru długości poniżej.
8. Nakłuwamy obszar poddawany zabiegowi.
9. Nakładamy cienką warstwę maski łagodzącej i pozostawiamy do wchłonięcia.
10. Nakładamy krem regenerujący.

Obszar	Długość igieł	
	Skóra cienka	Skóra normalna, gruba
Czoło	0,25-05 mm	0,5-0,75 mm
Lwia zmarszczka	0,25-05 mm	0,5-1,0 mm
Nos	0,25 mm	0,5 mm
Okolice oczu	0,25 mm	0,25 mm
Kości policzkowe	0,5 mm	0,5-1,0 mm
Policzki i podbródek	0,5-1,0 mm	1,0-2,0 mm
Okolica ust	0,25 mm	0,5-1,0 mm
Usta	0,25 mm	0,25 mm
Blizny na twarzy	1,0-1,25 mm	1,5-2,0 mm
Rozstępy	1,0-1,5 mm	1,5-2,5 mm
Głębokie blizny	2,0-2,5 mm	2,2-2,5 mm

Długość igieł	Prędkość
Poniżej 0,5 mm	S-1
0,50-0,75 mm	1-2
0,75-1,25 mm	2-3
1,25-1,50 mm	3-4
1,50-2,50 mm	5-H