

## Wykonywanie nakładki



1. Zalej wycisk alginatowy szybko utwardzalnym gipsem. Przycinanie jest mniej pracochłonne, jeśli użyta jest minimalna ilość gipsu.



2. Za pomocą kolomika kontroluj rezultaty pacjenta. Pokaż efekt pacjentowi i zanotuj wyniki w dokumentacji.



3. Aby uformować zbiorniczki na żel, nanieś około 0,5 mm grubości żywicy blokującej LC Block-Out na powierzchnie wargowe. Zachowaj odległość około 1,5 mm od brzegu dziąsłowego. Nie przechodź poza krawędzie sieczne ani powierzchnie żujące.



4. Formierzem ciśnieniowym podgrzewaj materiał na nakładkę (płytki Sof-Tray Classic) aż zacznie zwiśać około 2,5 cm. Dopasuj tworzywo sztuczne na formie. Pozostaw do schłodzenia i wyjmij model.



5. Precyzyjnie przytnij nakładkę 0,25 do 0,33 mm powierzchni żującej od brzegu dziąsłowego przy użyciu ząbkowanych nożyczek UltraDent Ultra-Trim.



6. Ponownie nakłóć nakładkę na model. Sprawdź rozszerzenie nakładki.



7. Delikatnie ogrzej krawędzie palnikiem, kwadrant po kwadrancie.



8. Wykończona i precyzyjnie docięta indywidualna nakładka jest gotowa do ostatecznego dopasowania w jamie ustnej pacjenta.